

Conveen®

 Coloplast

Уропрезерватив однокомпонентный самоклеящийся,
латексный



23319860 Coloplast является зарегистрированной торговой маркой компании Coloplast A/S.
© [2017-07-10] Все права защищены. Coloplast A/S, DK-3050 Humlebæk, Denmark. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04470 от 17.04.2014



Инструкция по использованию Conveen уропрезерватива латексного самоклеящегося



• При необходимости, удалите волосы на лобке.
• Кожа полового члена должна быть чистой и сухой.



1. Чтобы вскрыть упаковку, разорвите ее по всей длине.



2. Удерживая аппликатор за узкую часть, поместите уропрезерватив на кончик полового члена.
3. Продолжая придерживать аппликатор, удерживайте половой член в зафиксированном положении. Свободной рукой медленно потяните за раскручивающую ленту уропрезерватива в направлении основания полового члена, раскатывая уропрезерватив на всю длину. Убедитесь, что уропрезерватив раскатывается равномерно со всех сторон.



4. Снимите аппликатор.



5. Осторожно сожмите уропрезерватив вокруг тела полового члена, чтобы обеспечить его приклеивание. Нет необходимости в использовании дополнительных клеящих средств. Самоклеящийся уропрезерватив предназначен для одноразового использования в течение одних суток.



6. Чтобы снять самоклеящийся уропрезерватив, отсоедините его от мешка для сбора мочи и осторожно скатайте.

Символ



Содержит или имеет в составе натуральный латекс

Предупреждение:

Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к латексу.

Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что, в свою очередь, создает дополнительный риск нанесения телесных повреждений или развития инфекционных осложнений у пациента.

Внимание

Компания Coloplast не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

Показания

Мужской наружный катетер.

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

Изделие предназначено только для однократного применения. После использования его следует выбросить с бытовым мусором. Не смывать изделие в унитаз.

Претензии потребителя принимаются импортером.

Импортер: ООО «Колопласт»
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2
125315, Москва, Россия
Тел.: +7 495 937 53 90
info@coloplast.ru