


Уропрезерватив латексный с пластырем



5. Соедините сливной конец уропрезерватива с дренажной трубкой мочеприемника Conveen.

6. Предназначенные для одноразового использования уропрезерватив и адгезивный пластырь разрешается устанавливать на срок не более 24 часов. Повторное использование запрещается. Для снятия: равномерно сверните уропрезерватив вместе с пластырем.

7. После использования уропрезерватив следует выбросить с бытовым мусором. Не смывать изделие в унитаза.

Символ	
	Содержит или имеет в составе натуральный латекс



23319859 V7 Coloplast является зарегистрированной торговой маркой компании Coloplast A/S.
 © [2017-07-03] Все права защищены. Coloplast A/S, Hølstedam 1, 3050 Humle-bæk, Denmark.
 Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04470 от 17.04.2014

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

Претензии потребителя принимаются импортером.

Импортер: ООО «Колопласт»
 Ленинградский пр-т, д. 72 корп. 2
 Москва, Россия, 125315
 Тел.: +7 495 937 53 90
 info@coloplast.ru

Предупреждение

Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к латексу.

Повторное использование данного изделия, предназначенного для однократного применения, может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что, в свою очередь, создает дополнительный риск нанесения телесных повреждений или развития инфекционных осложнений у пациента.

Показания

Мужской наружный катетер.

Информация

Компания Coloplast не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

Инструкция по использованию уропрезерватива Conveen латексного с пластырем



- При необходимости, удалите волосы на лобке.
- Кожа полового члена должна быть чистой и сухой.

1. Чтобы вскрыть упаковку, разорвите ее по всей длине.



2. Удалите слой защитной бумаги с обеих сторон адгезивного пластыря. Осторожно потяните пластырь для активации его эластичности. Зафиксируйте один конец пластыря на теле полового члена несколько выше головки. Осторожно, с легким натяжением, оберните пластырь по оси вокруг тела полового члена.



3. Раскатайте уропрезерватив на половом члене поверх пластыря.



4. Для более плотного соединения легко надавите на уропрезерватив в месте его крепления к пластырю. Нет необходимости в использовании дополнительных клеящих средств.

