

Set

Наборы-мочеприемники для самокатетеризации

Мешок-мочеприемник – 1 шт, катетер EasiCath* – 1 шт., емкость с 0,9% раствором хлорида натрия – 1 шт.

*- катетер для самокатетеризации лубрицированный EasiCath с зафиксированным ПВП гидрофильным покрытием



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark



Инструкция по использованию

23320995 Version 4

Coloplast является зарегистрированной торговой маркой Колопласт А/С. Все права защищены. © 2018-06-29

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09276 от 13.05.2014

Производитель: Колопласт А/С, Дания

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

Импортер:

ООО «Колопласт»

Ленинградский пр-т, д.72, корп.2

Москва, Россия, 125315

Тел.: +7 495 937 53 90

info@coloplast.ru

Претензии потребителя принимаются Импортером.

Показания к применению

Состояния, требующие проведения периодической катетеризации

Информация

Компания Колопласт не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

Катетеризация должна проводиться как можно быстрее после вскрытия упаковки. После опорожнения мочевого пузыря катетер необходимо выбросить.

Использованный продукт следует выбросить с бытовым мусором. Не смывать в унитаз.

Меры предосторожности

В случае повреждения упаковки использование не допускается.

Проконсультируйтесь со своим врачом, перед первой самокатетеризацией.


Проконсультируйтесь со своим врачом, если:

- у вас появились такие симптомы как: лихорадка, дискомфорт при опорожнении мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию, кровь в моче.

Внимание

Изделие предназначено для однократного применения, повторное использование может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает дополнительный риск нанесения телесных повреждений или развития инфекционных осложнений у пациента.

Данное изделие содержит фталаты и может применяться у детей, беременных женщин и кормящих матерей только после консультации врача.

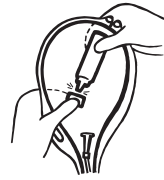

Тщательно вымойте руки и область вокруг наружного отверстия мочеиспускательного канала.

1. Вскройте упаковку и достаньте мочеприемник. Раздавите ампулу и выдавите воду внутрь мочеприемника. Удерживайте мочеприемник с катетером, направленным вертикально вниз.



MIN. 30 SEC.

2. Подождите по крайней мере 30 секунд.




3. Переверните мочеприемник узкой частью вверх и вскройте, оторвав его верхнюю часть.



4. Введите катетер в мочеиспускательный канал, осторожно выталкивая его из мочеприемника. Когда отток мочи прекратится, извлеките катетер на 2-3 см наружу. Если отток мочи возобновился, подождите несколько секунд, после чего извлеките катетер наружу еще на 1-2 см. Когда мочевой пузырь полностью опорожнится, медленно извлеките катетер из мочеиспускательного канала, одновременно вставляя его обратно в мочеприемник.



5. Завяжите узел на конце мочеприемника.

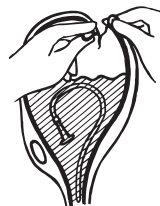

6. Выбросьте мочеприемник в мусорный контейнер, либо вместе с содержимым, либо предварительно опорожнив его.

Условные обозначения



DEHP
DBP

Содержится либо присутствует фталат: Комбинация бис (2-этилгексил) фталата (ДЭГФ) и дибutilфталата (ДБФ)



В случае повреждения упаковки использование не допускается.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.