

**Мочеприемник прикроватный**

Conveen Basic  
Conveen Standard

**Вешалка-крючок / штатив**

Conveen®  
Conveen Basic



Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark



Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark



**Инструкция по использованию**

23320093 Version 1

Coloplast является зарегистрированной торговой маркой Колопласт А/С. Все права защищены. © 2017-08-31

РУ № ФСЗ 2011/09474 от 26.05.2011

**Производитель:** Колопласт А/С, Дания

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

**Импортер:**

ООО «Колопласт»

Ленинградский пр-т, д.72, корп.2

Москва, Россия, 125315

Тел.: +7 495 937 53 90

info@coloplast.ru

Претензии потребителя принимаются Импортером.

**Показания**

Для сбора мочи.

**Предупреждение**

Компания Колопласт не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

**Условия хранения**

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

**Меры предосторожности**

В случае повреждения упаковки использование не допускается.


**Внимание**

Изделие предназначено для однократного применения, повторное использование может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает дополнительный риск нанесения телесных повреждений или развития инфекционных осложнений у пациента.


**Инструкция по использованию прикроватного мочеприемника Coloplast с вешалкой-крючком или штативом Coloplast**

**Подготовка**

1. Прикроватный мочеприемник необходимо присоединить непосредственно к уропрезервативу или уретральному катетеру.

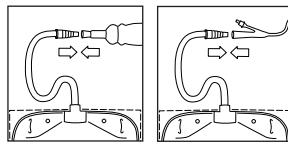


Для увеличения объема дренажной системы, например на ночь, прикроватный мочеприемник можно соединить с ножным мочеприемником. Для этого вставьте переходник дренажной трубки прикроватного мочеприемника в гибкую сливную трубку ножного мочеприемника.

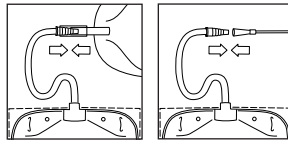

**Периодическая катетеризация**  
При проведении периодической катетеризации, прикроватный мочеприемник может быть присоединен к уретральному катетеру.


2. Если мочеприемник оснащен отверстием для отбора проб, при необходимости можно взять пробу мочи.

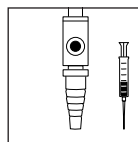

Conveen Standard


Используйте шприц с иглой или без иглы.

3. Если дренажная трубка не укомплектована входным переходником или сама трубка не соединена с мочеприемником, ее можно легко укоротить до необходимой длины, обрезав ножницами.

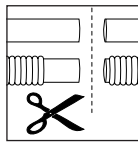


При укорачивании гофрированной трубки сохраните ее прямой участок максимально длинным. Это обеспечит надежное соединение между переходником и дренажной трубкой при присоединении переходника или между мочеприемником и дренажной трубкой при присоединении трубки.

4. Присоедините переходник к трубке, вставив узкий конец переходника как можно дальше в трубку.

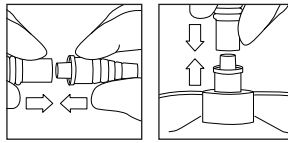

Или присоедините трубку к мочеприемнику, вставив обрезанный конец трубки до упора во входной переходник мочеприемника.


5. Для подвешивания прикроватного мочеприемника используйте вешалку-крючок Колопласт или штатив.

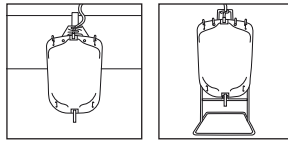


Надежно закрепите мочеприемник на вешалке-крючке или штативе, вставив зубцы вешалки-крючка или штатива в отверстия в верхней части мочеприемника. Подвесьте вешалку-крючок на раме кровати или установите штатив на полу рядом с кроватью. Для оптимального оттока мочи необходимо разместить прикроватный мочеприемник ниже уровня кровати.

**Периодическая катетеризация**  
Независимо от того, в каком положении - сидя, лежа или стоя, вы будете находиться во время катетеризации, необходимо подвесить или разместить мочеприемник ниже уровня малого таза.


6. Убедитесь, что сливной клапан закрыт.

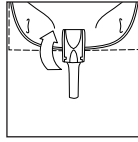

Сливной клапан зашелкнувшегося типа Conveen Standard

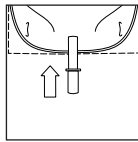


Сливной клапан вытяжного типа Conveen Basic

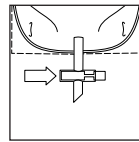

Сливной клапан затворного типа Conveen Basic

## Применение

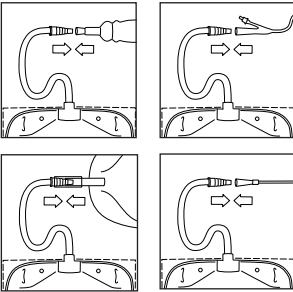
- 7
- 
7. Если на переходнике имеется защитный колпачок, снимите его. Надежно присоедините переходник к уропрезервативу или катетеру.
- Или присоедините переходник к дренажной трубке ножного мочеприемника. Откройте сливной клапан ножного мочеприемника.
- Система сбора мочи готова к работе.
- Периодическая катетеризация*  
Присоедините переходник к катетеру для периодической катетеризации.
- При катетеризации моча будет стекать в прикроватный мочеприемник.

- 8
- 
- Сливной клапан защелкивающегося типа Conveen Standard
- Сливной клапан вытяжного типа Conveen Basic
- Сливной клапан затворного типа Conveen Basic
- Без сливного клапана Conveen Basic
8. Для оптимального оттока мочи, рекомендуется опорожнять мочеприемник, когда он заполнен чуть больше, чем наполовину.
- Периодическая катетеризация*  
Опорожняйте прикроватный мочеприемник после каждой катетеризации.

## Удаление

9. Отсоедините прикроватный мочеприемник от уропрезерватива или уретрального катетера. Если прикроватный мочеприемник присоединен к ножному мочеприемнику, сначала закройте сливной кран ножного мочеприемника. Затем отсоедините прикроватный мочеприемник. Не прикасайтесь к открытому концу сливной трубки ножного мочеприемника.
- Периодическая катетеризация*  
После завершения катетеризации отсоедините прикроватный мочеприемник от катетера для периодической катетеризации. Снимите мочеприемник с вешалки-крючка или штатива.

## Утилизация

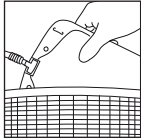- 10
- 
10. Мочеприемник предназначен только для однократного использования. Использованный мочеприемник можно выбросить с бытовым мусором. Не смывать в унитаз.
- Опорожните мочеприемник прежде чем его выбросить.
- Вешалка-крючок и штатив могут использоваться повторно.

## Условные обозначения

- В случае повреждения упаковки использование не допускается.

