


Внимание

Изделие предназначено для однократного применения, повторное использование может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создает дополнительный риск нанесения телесных повреждений или развития инфекционных осложнений у пациента.

Применение анального тампона Peristeen

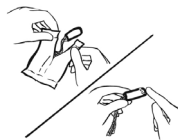

Применение анального тампона показано людям, страдающим недержанием кала или непроизвольным выделением газов из кишечника. Анальный тампон Peristeen является эффективным барьером, предотвращающим неконтролируемое выделение каловых масс из прямой кишки.

1. Подготовка

Нанести небольшое количество геля Peristeen на кончик анального тампона Peristeen. Вместо него могут быть использованы любые другие смазывающие вещества на водной основе.



2. Введение

Осторожно введите анальный тампон Peristeen в анальное отверстие так же, как вводят свечи. Убедитесь, что анальный тампон Peristeen полностью введен в прямую кишку, глубже анального сфинктера. Шнур должен оставаться снаружи.



3. Применение

При правильном введении анального тампона Peristeen в прямую кишку, он быстро расправляется и увеличивается до нормального размера после растворения пленки под воздействием естественного тепла и влаги. Тампон может находиться в прямой кишке в течение 12 часов.



4. Извлечение

Для извлечения анального тампона Peristeen из прямой кишки необходимо осторожно потянуть за шнур, присоединенный к анальному тампону Peristeen. Извлечение анального тампона не стимулирует рефлекс опорожнения прямой кишки. Новый анальный тампон Peristeen может быть введен непосредственно после извлечения использованного тампона. После использования анальный тампон Peristeen следует выбросить в мусорный бак. В унитаз НЕ СМЫВАТЬ.

Примечание: Анальный тампон Peristeen следует извлечь не позднее, чем через 12 часов после введения. В случае возникновения трудностей, связанных с извлечением анального тампона Peristeen следует обратиться к врачу.



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark



Инструкция по использованию

23319865 Version 1

Coloplast является зарегистрированной торговой маркой Колопласт А/С. Все права защищены. © [2017-07-06]

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09474 от 26-05-2011

Условия хранения

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

Показания

Недержание кала и непроизвольное выделение газов из кишечника.

Противопоказания

- геморрой (3-й или 4-й степени тяжести)
- анальный стеноз

Предупреждение

Компания Колопласт не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

При нормальной чувствительности в ректальной области процесс привыкания к анальному тампону не занимает много времени. Как правило, у людей с пониженной или ослабленной чувствительностью не возникает проблем, связанных с привыканием.

Каловые массы должны быть твердыми и сформированными. Анальные тампоны бывают двух размеров. Размер тампона не может быть определен заранее. Следует попробовать тампоны обоих размеров и выбрать наиболее подходящий.

Некоторые пользователи, регулярно применяющие анальные тампоны, могут заметить, что иногда тампон может вытесняться из прямой кишки. Видимых причин подобной реакции нет, однако опыт показывает, что те же пользователи могут возобновить успешное использование тампонов после короткого перерыва.

Меры предосторожности

Перед использованием данного продукта необходима консультация медицинского специалиста.

Перед первым использованием анального тампона Peristeen следует обратиться к врачу для получения медицинской консультации по применению тампона.

Анальный тампон не следует использовать при диарее.

При попадании в рот анальный тампон Peristeen увеличивается в объеме и может вызвать удушье.

При позывах к дефекации анальный тампон следует удалить. При отсутствии чувствительности в ректальной области и позывов к дефекации замену тампона следует производить через равные промежутки времени в соответствии с рекомендациями.

Анальный тампон Peristeen следует извлечь не позднее, чем через 12 часов после введения. В случае возникновения трудностей, связанных с извлечением анального тампона Peristeen следует обратиться к специалисту.

Производитель: Колопласт А/С, Дания

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

Импортер:

ООО «Колопласт»

Ленинградский пр-т, д.72, корп.2

Москва, Россия, 125315

Тел.: +7 495 937 53 90

info@coloplast.ru

Претензии потребителя принимаются Импортером.